# RESPIRADOR FFP2 NR









Este produto segue os requisitos da Norma Europeia EN149:2001+A1:2009 e do Regulamento (UE) 2016/425

# **USO ÚNICO**

5 CAMADAS DE PROTEÇÃO

# **INFORMAÇÃO DO FABRICANTE**

# **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**



## BETINATEXTEIS LAR, Importação e Exportação, Lda.

R. Bernardo Oliveira Gordalina,  $n^{\underline{o}}9$  2415-400 Leiria, Portugal



### www.betinatexteis.com

Para consultar a Declaração de Conformidade visite o site do fabricante.



2 anos | 2 years



### BTRFFP2





Antes de usar lave bem as mãos e certifique-se que a máscara não está danificada.











- Segure a máscara com o arame nasal para cima e as letras para o exterior.
- 2. Coloque a máscara tapando o nariz e a boca totalmente.
- 3. Prenda os elásticos nas orelhas.
- 4. Pressione o arame nasal e ajuste ao seu rosto.
- Cubra a máscara com as mãos e respire rapidamente para verificar se não há saídas de ar pelas laterais.
  Se necessário reajustar.

Lembre-se que a máscara é descartável e por isso deve ser deitada no lixo no final da sua utilização.









